

Số: 1287/QĐ-BVĐKT

Thanh Hóa, ngày 03 tháng 9 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy trình xử lý dụng cụ nội soi tại Khoa Gây mê hồi sức

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH THANH HOÁ

Căn cứ Thông tư số 19/2013/TT-BYT ngày 12/7/2013 của Bộ Y tế về việc Hướng dẫn thực hiện quản lý chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại bệnh viện;

Căn cứ Thông tư số 16/2018/TT-BYT ngày 20/7/2018 của Bộ Y tế quy định về kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

Căn cứ Thông tư 43/2018/TT-BYT ngày 26/12/2018 của Bộ Y tế Hướng dẫn phòng ngừa sự cố y khoa trong các cơ sở khám bệnh chữa bệnh;

Căn cứ Quyết định 56/QĐ-K2ĐT ngày 16/5/2014 của Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo - Bộ Y tế về việc ban hành chương trình và tài liệu đào tạo “An toàn người bệnh”;

Căn cứ Quyết định số 6858/QĐ-BYT ngày 18/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 3916/QĐ-BYT ngày 28/8/2017 của Bộ Y tế về việc phê duyệt các Hướng dẫn kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

Căn cứ Quyết định 7482/QĐ-BYT ngày 18/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Bộ tiêu chí chất lượng đánh giá mức độ an toàn phẫu thuật,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành Quy trình xử lý dụng cụ nội soi tại Khoa Gây mê hồi sức (có Phụ lục 01 và 02 đi kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông (Bà) Trưởng các Khoa Gây mê hồi sức, Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, Khoa Dược và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Ban Giám đốc;
- Như Điều 2;
- Lưu VT, KHTH, QLCL.


GIÁM ĐỐC
Lê Văn Sỹ

PHỤ LỤC 01

QUY TRÌNH XỬ LÝ DỤNG CỤ NỘI SOI THƯỜNG QUY

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1287/QĐ-BVĐKT ngày 03/9/2019)



Bước 1: Dụng cụ sau khi phẫu thuật, xả dưới vòi nước (nguồn nước RO) để loại bỏ bớt dịch, máu, mô.

Bước 2: Tháo mở dụng cụ

Bước 3: Ngâm ngập dụng cụ trong dung dịch Enzyme (pha theo tỷ lệ hướng dẫn) từ 3-5 phút.

Bước 4: Dùng bàn chải/chổi cọ rửa, lưu ý khớp cử động và lòng ống. Dụng cụ sau khi cọ rửa sạch trong Enzyme vớt ra xả sạch dưới vòi nước RO.

Bước 5: Sau khi xả sạch dụng cụ dưới vòi nước RO, làm ráo nước và ngâm ngập trong dung dịch khử khuẩn mức độ cao (Steranios 2%) trong vòng 1 giờ. Sau 1 giờ, vớt dụng cụ ra tráng qua thùng nước cất.

Bước 6: Dụng cụ vớt từ chậu nước cất thứ hai ra dốc hết nước để lên bàn tuýp có trải khăn vô khuẩn.

Bước 7: Dùng máy nén khí sạch xì khô khớp cử động, lòng ống và chuyển vào khay bảo quản

Lưu ý: Bước này tiếp tục đeo găng tay vô khuẩn. **TRƯỚC MỖI CA PHẪU THUẬT**, lấy dụng cụ ở nơi bảo quản ra và làm lại từ **BUỚC 5**, nhưng chỉ ngâm trong chậu khử khuẩn mức độ cao Steranios 2% trong vòng 15 phút. Chậu dung dịch này sử dụng được trong vòng 14 ngày hoặc 28 ngày, sau đó đổ bỏ theo đường nước thải y tế của bệnh viện. *Khomb*

PHỤ LỤC 02

QUY TRÌNH XỬ LÝ DỤNG CỤ NỘI SOI CÓ NGHI NGỜ NHIỄM HIV

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1287/QĐ-BVĐKT ngày 03/9/2019)

Bước 1: Sau khi làm xong cho bệnh nhân tháo mở dụng cụ.

Bước 2: Ngâm ngập dụng cụ trong dung dịch Enzyme (pha theo tỷ lệ hướng dẫn) từ 3-5 phút (thùng ngâm riêng) sau đó vớt dụng cụ ra không sử dụng lại dung dịch này nữa.

Bước 3: Dùng bàn chải/chổi (riêng) cọ rửa, lưu ý khớp cử động và lòng ống. Dụng cụ sau khi cọ rửa sạch trong Enzyme vớt ra xả sạch dưới vòi nước RO.

Bước 4: Chuyển khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn hấp sấy dụng cụ bằng phương pháp hấp sấy nhiệt độ thấp và thùng đựng dung dịch bằng phương pháp hấp sấy nhiệt độ cao. Thonh